

# Technisches Datenblatt

## MINION FFP3/V

### **Produkt-Bezeichnung:**

Atemschutzmaske MINION & NOVA FFP3/V (DIN EN 149:2001 FFP3 NR)

Angewandte Norm: DIN EN 149:2009

### **Verwendung:**

Schutz gegen feste und flüssige Partikeln giftiger bzw. hochgiftiger Stoffe, mit Ausatemventil. Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert. Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.

### **Beschreibung:**

Die Atemschutzmaske MINION FFP3/V besteht aus mehreren Materialschichten.

### **Materialien:**

Sämtliche verwendete Materialien sind veraschbar.

Partikelfilter: Mikroglasfaser / Melt Blown

Bänderung: Gummiband

Nasenbügel: Polyethylen / Metall

Nasenpolsterung: Schaumstoff (innen)

Innendichtlippe: Polyurethan

Ausatemventil: Gehäuse: Polypropylen; Scheibe: Gummi

### **Arbeitsprinzip:**

Partikel werden durch das Melt Blown-Filter filtriert.

Gewicht: ca. 18 Gramm

Partikel-Abscheidegrad:

Test

Aerosol: Natriumchlorid: 99 %

Mindest-Abscheidegrad (EN 149): Paraffinöl: 99 %

### **Einatemwiderstand:**

bei 30 l/min, konstanter Flow max. 1,0 mbar (nach EN 149) bei 95 l/min, konstanter Flow max. 3,0 mbar (nach EN 149)

Ausatemwiderstand: bei 160 l/min, konstanter Flow max. 3,0 mbar (nach EN 149)

Kennzeichnung: Markenzeichen des Herstellers (LOGO) Produkt-Bezeichnung

Artikelnummer gültige Norm Ende der Lagerfähigkeit (YYYY/MM/DD)  
Informationsbroschüre des Herstellers beachten Chargen-Nr. CE-Kennzeichnung  
Prüfstelle Kennfarben: weiß

**Handhabung:**

Atemschutzmaske erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Verpackung nehmen und gemäß Aufsetzanleitung über Mund, Nase und Kinn anbringen (siehe Polybeutel).

**Bereithaltung:**

Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten.

**Warnhinweis:**

Informationsbroschüre des Herstellers beachten!

**Verwenderhinweise:**

Bozak garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Dieses kann zu längeren oder kürzeren Haltezeiten führen. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß BGR 190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte